

# Guía de tallas y medidas de arneses de Arjo

El sistema de tamaños y medidas de arneses de Arjo tiene en cuenta tanto la altura (si procede) como la anchura del paciente para determinar el tamaño correcto del arnés.

El sistema incluye tablas de tallas (con colores de tallas) que coinciden con las medidas de los pacientes y los tamaños de los arneses. Las tablas e instrucciones son específicas de los diferentes tipos de arneses y también se pueden encontrar en las instrucciones de uso (IDU).

Existen muchas instrucciones de uso diferentes para los arneses de Arjo, y en esta guía, todas las tablas de tamaños e instrucciones de medición se han reunido en el mismo documento para respaldar un dimensionamiento eficiente de los arneses.

Esta guía se centra únicamente en el tamaño y la medición de los arneses y no sustituye a las IDU de los mismos. Consulte siempre las IDU cuando utilice arneses de Arjo.

## ¿Cómo sé que he seleccionado el tamaño correcto?

Una vez que se ha colocado el arnés en el paciente, hay una serie de indicadores clave para ayudar a verificar que se ha seleccionado el tamaño correcto.

Puede encontrar instrucciones detalladas en la sección «Aplicación del arnés» de las IDU del arnés. Instrucciones;

1. Busque la referencia del arnés (por ejemplo, en la etiqueta del producto).



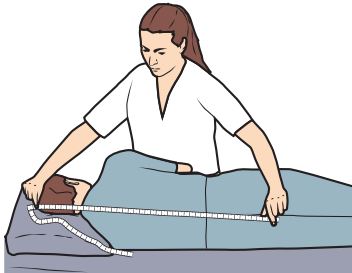
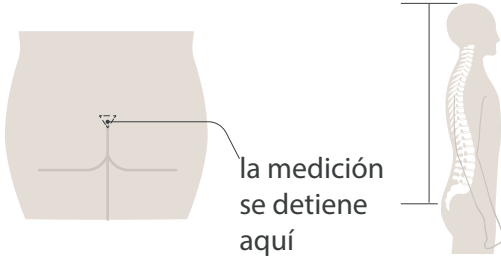

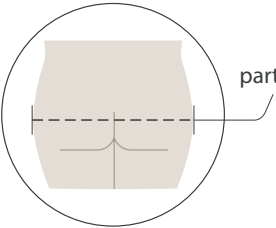
2. Identifique la tabla de tamaños correcta en la lista de productos.
3. Siga las instrucciones de la tabla para medir la altura y la anchura del paciente, y compruebe la tabla para encontrar el tamaño del arnés.

LISTA DE PRODUCTOS		
Referencia	Nombre del arnés	Nombre de la tabla
MAA2000M	Arnés con clips y piernas sin acolchado	«Clip Slings pasivos normales», página 4
MAA2040M	Arnés in situ con clips, piernas sin acolchado	
MAA2070M	Arnés de baño in situ con clips y piernas sin acolchado	
MAA4000M	Arnés con clips y piernas con acolchado	
MAA4050M	Arnés de confort con clips, piernas con acolchado	
MAA4060M	Arnés de baño con clips y piernas sin acolchado	
MAA4061M	Arnés de baño con clips y piernas con acolchado	
MFA1000M	Arnés con clips desechable	
MAA4031M	Arnés de WC con clips y piernas con acolchado	
MAA4100M	Arnés con clips, piernas ampliadas y con acolchado	«Clip Slings para piernas extendidas», página 5
MAA4160M	Arnés de baño con clips, piernas ampliadas y sin acolchado	
MFA2100	Arnés de bucles desechable	«Arneses de bucle pasivo», página 6
MLA2000	Arnés de bucles, piernas con acolchado	
MLAAS2000	Arnés de bucles in situ con piernas con acolchado	
MLA3000	Arnés de bucles con piernas con acolchado y sin reposacabezas	
MLA4060	Arnés de bucles para el baño, piernas sin acolchado	
MLA4031	Arnés de WC de bucles con piernas con acolchado	
MLA4531	Arnés de WC de bucles con piernas con acolchado y sin reposacabezas	
MAA4020M	Arnés con clips pediátrico	«Arnés pediátrico», página 7
THA6i	Arnés de bucles tipo hamaca con 6 puntos de sujeción	«Arnés tipo hamaca», página 8
THAi	Arnés de bucles tipo hamaca con 4 puntos de sujeción	
TIR	Arnés de bucles de ajuste rápido, sin reposacabezas	«Arnés TIR», página 9
MAA2050M	Arnés in situ con clips para amputados	«Arneses con clips para amputados de las dos piernas», página 10
MAA2080M	Arnés de baño in situ con clips para amputados	
MAA2090M	Arnés con clips para amputados	
MAA2091M	Arnés de WC con clips para amputados	
MAA4040M	Arnés con clips para amputados con sujeción con velcro	
MAA7090M	Arnés de baño con clips para amputados	

LISTA DE PRODUCTOS		
Referencia	Nombre del arnés	Nombre de la tabla
MAA4070M	Arnés con clips para amputados de la pierna derecha	«Arneses con clips para amputados de una sola pierna», página 11
MAA4080M	Arnés con clips para amputados de la pierna izquierda	
MLA7000	Arnés de bucles tipo hamaca para amputados	«Arnés tipo hamaca para amputados», página 12
MAA8000	Arnés de bucles bariátrico cómodo	«Arneses bariátricos», página 13
MAA8010	Arnés de bucles bariátrico	
MFA8010	Arnés de bucles bariátrico desechable	
MAA8020	Arnés de bucles bariátrico tipo hamaca con piernas divididas	
MAA8030	Arnés de bucles bariátrico tipo hamaca	
TEM	Arnés de bucle para caminar	«Arneses para transferencia en posición erguida y para caminar», página 14
MAA3071M	Arnés bipedestador de clip Sara plano	
MFA3000	Arnés bipedestador desechable Sara Flex	
TSS.500 - 504	Arnés bipedestador Sara Flex	
TSS.500S-1C -503S-1C	Arnés bipedestador Sara Flex con cinturón independiente con un cierre	
TSS.500W-TSS.503W	Arnés bipedestador limpiable Sara Flex	
TSS.511	Arnés de transferencia sentado Sara Flex	
KKA5120	Arnés bipedestador Sara Plus	
KKA5130M	Arnés para caminar Sara Plus	
KKA5370	Arnés bipedestador Sara Plus: apoyo postural adicional	
MFA4000	Arnés bipedestador desechable Sara Plus	
KKA6000	Arnés bipedestador limpiable Sara Plus	
MAA5000	Walking Jacket con bucle	«Arnés de bucle para caminar», página 15
MAA1150	Arnés de bucles de camilla con apertura cómoda	«Arneses de camilla blanda», página 16
MAA1151	Arnés de bucles de camilla	
MAA1152	Arnés de bucles de camilla para el baño, con apertura cómoda	
MFA5000	Arnés de bucles de camilla desechable	

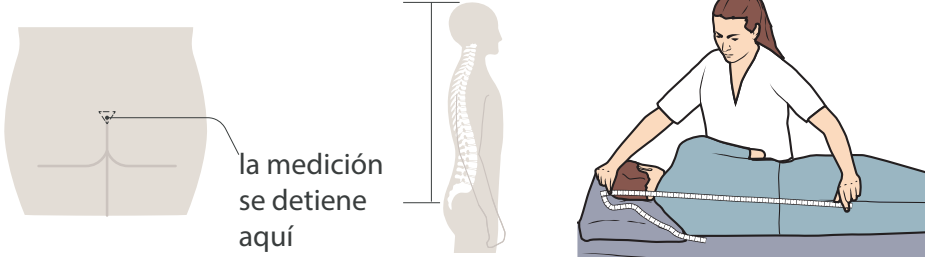
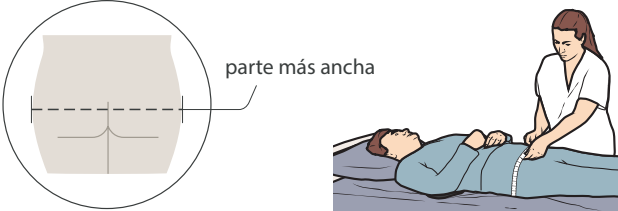
# Clip Slings pasivos normales

## Tabla de tamaños

<div>Modelos de arnés</div> <div>MAA2000M, MAA2040M, MAA2070M, MAA4000M, MAA4060M, MAA4031M, MAA4061M, MFA1000M, <b>MAA4050M*</b></div>		<div>Parte superior de la cabeza al cóccix</div> <div></div>					
<div>Circunferencia de la parte inferior de la cadera</div> <div></div>	cm (in)	60-65 (23,5-25,5)	66-73 (26-29)	74-81 (29-32)	82-89 (32,5-35)	90-95 (35,5-37,5)	96-103 (38-40,5)
	70-80 (27,5-31,5)	XS	S	M	L	LL	XL
	81-93 (32-36,5)	S	S	M	L	LL	XL
	94-106 (37-41,5)	M	M	M	LL	LL	XL
	107-125 (42-49)	M	L	L	LL	XL	XL
	126-136 (49,5-53,5)	L	LL	LL	LL	XL	XL
	137-155 (54-61)	XL	XL	XL	XL	XL	XXL
	156-220 (61,5-86,5)*	/	/	XXL	XXL	XXL	XXL
* Está limitado a 200 cm / 78,5 pulgadas							

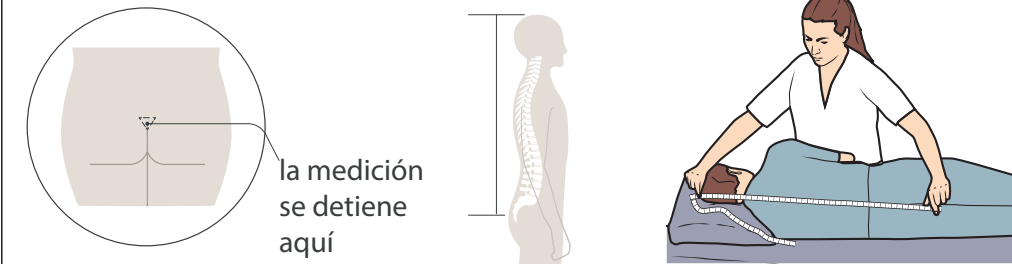
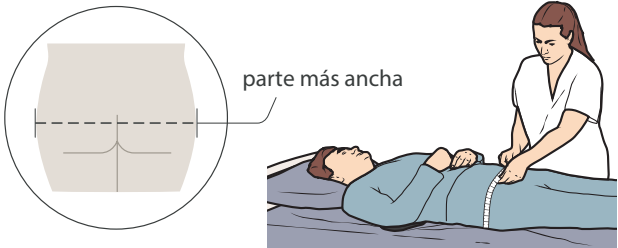
# Clip Slings para piernas extendidas

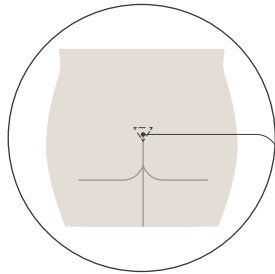
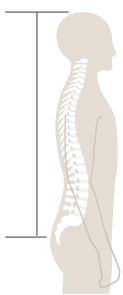
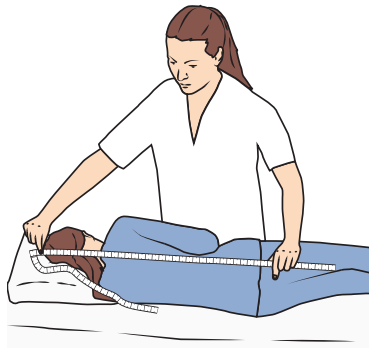

## Tabla de tamaños

Modelos de arnés		Parte superior de la cabeza al cóccix						
MAA4100M, MAA4160M								
		cm (in)	60-65 (23,5-25,5)	66-73 (26-29)	74-81 (29-32)	82-89 (32,5-35)	90-95 (35,5-37,5)	96-103 (38-40,5)
Circunferencia de la parte inferior de la cadera		87-100 (34-39,5)	S	S	M	L	LL	XL
		101-117 (40-46)	M	M	M	LL	LL	XL
		118-130 (46,5-51)	M	L	L	LL	XL	XL
		131-145 (51,5-57)	L	LL	LL	LL	XL	XL
		146-175 (57,5-69)	XL	XL	XL	XL	XL	XXL
		176-240 (69,5-97,5)	/	/	XXL	XXL	XXL	XXL

Arneses de bucle pasivo

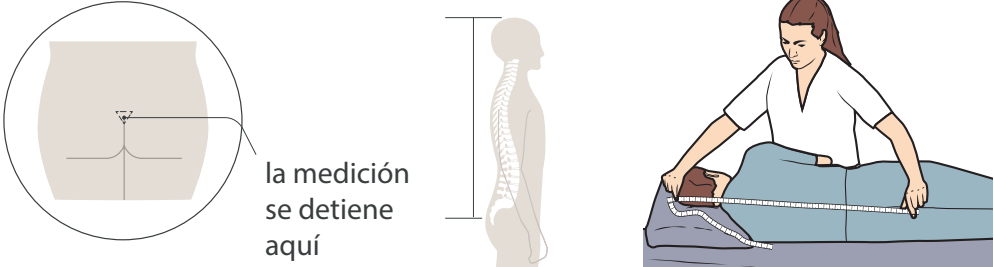
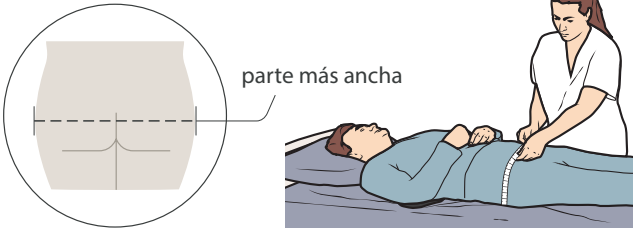
Tabla de tamaños

<div>Modelos de arnés</div> <div>MLA2000, MLAAS2000, MLA4060, MLA4031, MLA4531, MFA2100, MLA3000</div>		<div>Parte superior de la cabeza al cóccix</div> <div><div>la medición se detiene aquí</div></div>				
<div>Circunferencia de la parte inferior de la cadera</div> <div><div>parte más ancha</div></div>	cm (in)	65-71 (25,5-28)	72-79 (28,5-31)	80-85 (31,5-33,5)	86-93 (34-36,5)	94-105 (37-41,5)
	79-99 (31-39,5)	S	M	L	L	/
	100-116 (40-45,5)	M	M	L	XL	XXL
	117-133 (46-52,5)	M	L	L	XL	XXL
	134-154 (53-60,5)	L	XL	XL	XL	XXL
	155-170 (61-67)	/	XXL	XXL	XXL	XXL

Modelo de arnés		Parte superior de la cabeza al cóccix				
MAA4020M		<div><div><p>la medición se detiene aquí</p></div><div></div><div></div></div>				
		cm (in)	50-54 (19 1/2-21 1/4)	55-59 (21 1/2-23 1/4)	60-65 (23 1/2-25 1/2)	66-73 (25 3/4-28 3/4)
<div>Circunferencia de la parte inferior de la cadera</div> <div></div>	50-59 (19 1/2-23 1/4)	XXS	XXS	XXS	XS	
	60-69 (23 1/2-27 1/4)	XXS	XXS	XS	XS	
	70-80 (27 1/2-31 1/2)	XXS	XXS	XS	S	
	81-100 (31 3/4-39 1/2)	XXS	XS	S	S	


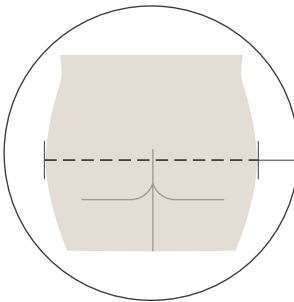
Arnés tipo hamaca

Tabla de tamaños

Modelos de arnés		Parte superior de la cabeza al cóccix						
THA6i, THAi								
		cm (in)	40-45 (16-17,5)	46-52 (18-20,5)	53-66 (21-26)	67-81 (26,5-32)	82-90 (32,5-35,5)	91-100 (36-40)
Circunferencia de la parte inferior de la cadera		55-70 (21,5-27,5)	XXS	XS	S	M	L	XL
		71-80 (28-31,5)	XS	XS	S	M	L	XL
		81-99 (37-41,5)	S	S	S	M	L	XL
		100-120 (39,5-47)	M	M	M	M	L	XL
		121-135 (47,5-53)	L	L	L	L	L	XL
		136-155 (53,5-61)	XL	XL	XL	XL	XL	XL

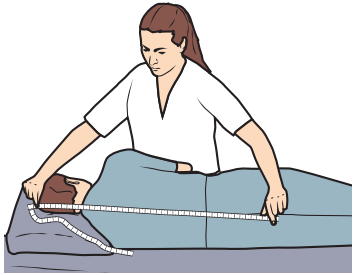
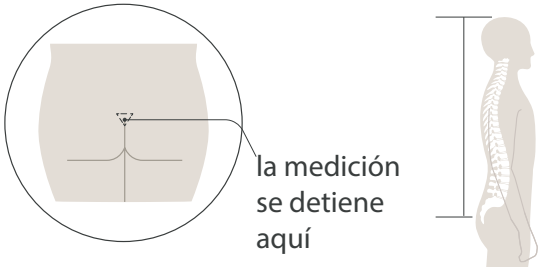

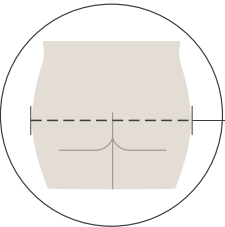


Modelo de arnés
TIR

Circunferencia de la parte inferior de la cadera		
<div></div>		
cm (in)		
85-119 (33,5-47)	120-139 (47-55)	140-166 (55-65,5)
S	M	L

Arneses con clips para amputados de las dos piernas

Tabla de tamaños

<div>Modelos de arnés</div> <div>MAA2050M, MAA2080M, MAA2090M, MAA2091M, MAA4040M, MAA7090M</div>		<div>Medir desde la parte superior de la cabeza hasta el cóccix</div> <div></div>					
<div>Circunferencia de la parte inferior de la cadera</div> <div></div>	cm (in)	60-65 (23,5-25,5)	66-73 (26-29)	74-81 (29-32)	82-89 (32,5-35)	90-95 (35,5-37,5)	96-103 (38-40,5)
	70-80 (27,5-31,5)	XS	S	M	L	LL	XL
	81-93 (32-36,5)	S	S	M	L	LL	XL
	94-106 (37-41,5)	M	M	M	LL	LL	XL
	107-125 (42-49)	M	L	L	LL	XL	XL
	126-136 (49,5-53,5)	L	LL	LL	LL	XL	XL
	137-155 (54-61)	XL	XL	XL	XL	XL	XXL
	156-220 (61,5-86,5)	/	/	XXL	XXL	XXL	XXL

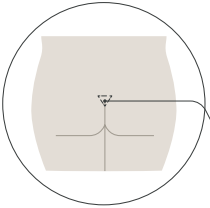
Arneses con clips para amputados de una sola pierna

Tabla de tamaños

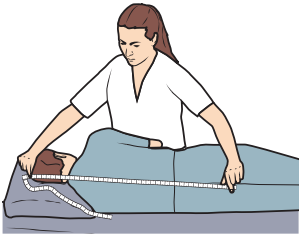
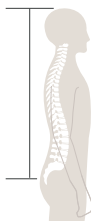
Modelos de arnés

MAA4070M, MAA4080M

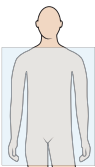
Parte superior de la cabeza al cóccix




la medición se detiene aquí



Identificar el tipo de cuerpo



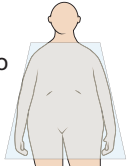
Forma de cuerpo rectangular


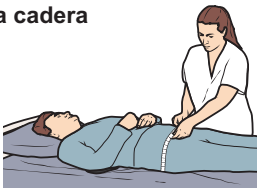


Forma de cuerpo trapezoidal invertida

O

Forma de cuerpo trapezoidal




	cm (in)	65-70 (25,5-27,5)	71-75 (28-29,5)	76-82 (30-32,5)	83-90 (32,5-35,5)	91-105 (36-41,5)
<b>Circunferencia del hombro</b> 	80-99 (31,5-39)	M	M	M	L	LL
	100-114 (39,5-45)	M	M	L	LL	LL
	115-130 (45,5-51)	L	L	L	LL	XL
	131-149 (51,5-59)	LL	LL	LL	LL	XL
	150-170 (59-67)	XL	XL	XL	XL	XL
	cm (in)	65-70 (25,5-27,5)	71-75 (28-29,5)	76-82 (30-32,5)	83-90 (32,5-35,5)	91-105 (36-41,5)
<b>Circunferencia de la parte inferior de la cadera</b> 	80-95 (31,5-37,5)	M	M	M	L	LL
	96-112 (38-44)	M	M	L	LL	LL
	113-129 (44,5-51)	L	L	L	LL	XL
	130-145 (51-57)	LL	LL	LL	LL	XL
	146-166 (57,5-65,5)	XL	XL	XL	XL	XL

Arnés tipo hamaca para amputados

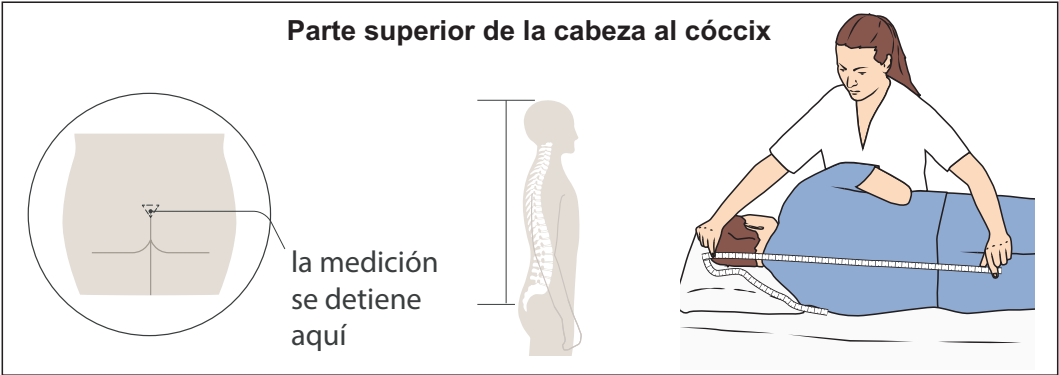
Tabla de tamaños

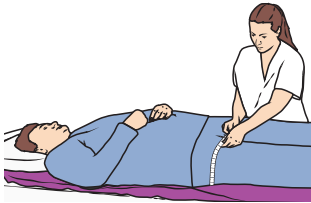
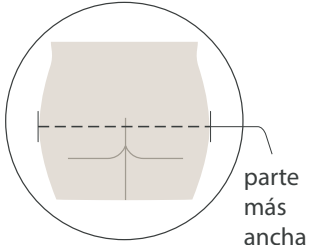
Modelo de arnés
MLA7000

Circunferencia del hombro			
			
cm (in)			
80-120 (31,5-47)	105-125 (41,5-49)	110-130 (43,5-51)	120-140 (47-55)
S	M	L	XL

Arneses bariátricos

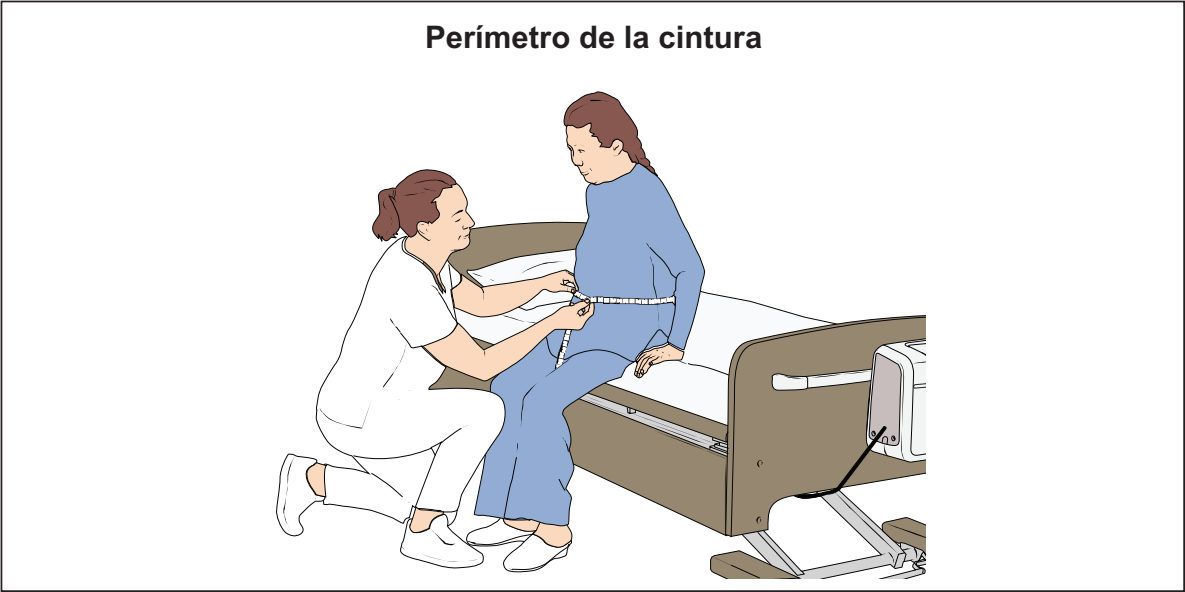
Tabla de tamaños



Medida	Modelos de arnés	cm (in)	72-79 (28 3/8-31 1/4)	80-85 (31 1/2-33 1/2)	86-93 (33 3/4-36 3/4)	94-105 (37-41 1/4)	106-115 (41 1/2-45 1/4)
<p>Circunferencia de la parte inferior de la cadera</p>  	MAA8000 MAA8010 MFA8010	170-179 (66 7/8-70 1/2)	M	M	M	L	XL
		180-189 (70 3/4-74 1/2)	M	M	L	XL	XXL
		190-199 (74 3/4-78 1/2)	M	L	XL	XL	XXL
		200-209 (78 3/4-82 1/4)	L	XL	XL	XXL	XXL
		210-219 (82 1/2-86 1/4)	XL	XL	XL	XXL	/
	MAA8020 MAA8030	cm (in)	67-81 (26 3/8-32)	82-90 (32 1/4-35 1/2)	91-100 (35 3/4-39 1/2)	101-110 (39 3/4-43 1/4)	111-120 (43 1/2-47 1/4)
		155-164 (61-64 3/4)	M	L	XL	XL	XXL
		165-179 (65-70 1/2)	L	L	XL	XL	XXL
		180-194 (70 3/4-76 1/2)	L	L	XL	XL	XXL
		195-209 (76 3/4-82 1/4)	XL	XL	XL	XXL	XXL
		210-219 (82 1/2-86 1/4)	XL	XL	XXL	XXL	/

Arneses para transferencia en posición erguida y para caminar

Tabla de tamaños

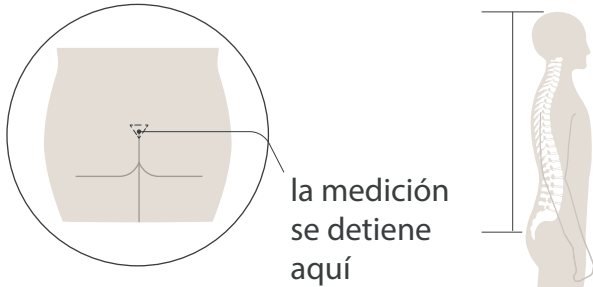


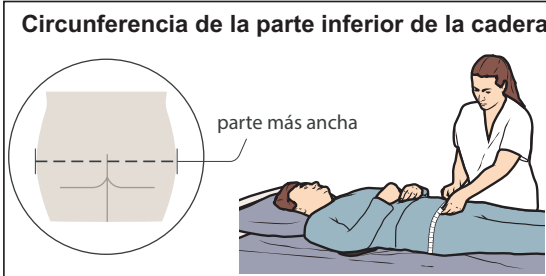
		S	M	L	XL	XXL	Talla única
		cm (in)					
Modelos de arnés	TSS.500-504	69-86 (27-34)	84-113 (33-44,5)	107-156 (42-61,5)	157-184 (62-72,5)	173-201 (68-79)	/
	TSS.500-503S-1C	63-130 (25-51)	89-130 (35-51)	91-133 (36-52,5)	104-160 (41-63)	/	/
	KKA5120, KKA5370 y KKA5130M	70-97 (27,5-38)	98-117 (38,5-46)	118-137 (46,5-54)	138-169 (54,5-66,5)	/	/
	KKA6000, TSS.500W-TSS503W	69-86 (27-34)	84-110 (33-43,5)	100-135 (39,5-53)	120-160 (47-63)	/	/
	TEM	60-89 (23,5-35)	88-107 (34,5-42)	108-125 (42,5-49)	/	/	/
	MFA3000, MFA4000	/	/	/	/	/	80-125 (31,5-49)
	MAA3071	/	/	/	/	/	60-130 (23,5-51)

Arnés de bucle para caminar

Tabla de tamaños

Modelo de arnés
MAA5000M

		Parte superior de la cabeza al cóccix			
					
		65-74 (25,5-29)	75-83 (29,5-32,5)	84-89 (33-35)	90-94 (35,5-37)
Circunferencia de la parte inferior de la cadera	cm (in)				
	65-79 (25,5-32)	S	M	L	XL
	80-105 (31,5-41,5)	S	M	L	XL
	106-129 (41,5-51)	L	L	L	XL

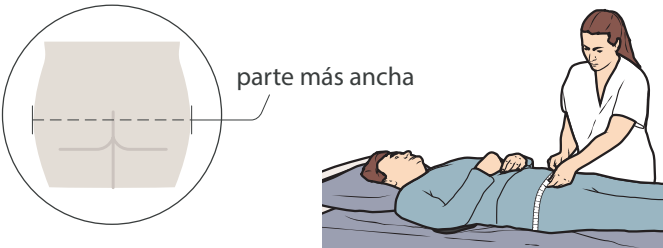


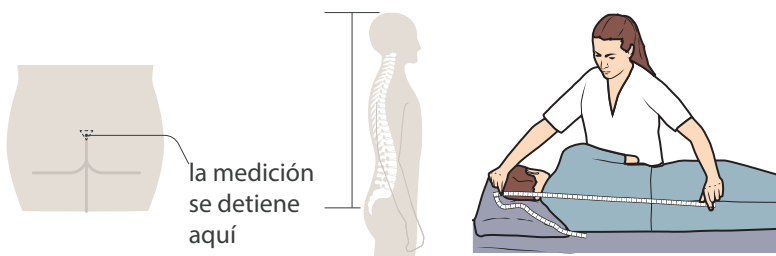
Arneses de camilla blanda

Tabla de tamaños

Modelos de arnés	MAA1150, MAA1151, MAA1152
	MFA5000

Circunferencia de la parte inferior de la cadera



<div>Parte superior de la cabeza al cóccix</div> <div></div>	cm (in)	Máximo 130 (51)	Máximo 170 (67)
	Máximo 81 (32)	L	XL
	Máximo 90 (35,5)	/	Talla única